

000/0080.041/20



Contusio Duopatch

De warmtepleister Contusio Duopatch zorgt voor een aangename warmte gedurende ca. 8 uur en voor pijnverlichting bij gespannen spieren, vermoeidheid, artritis en menstruatiepijn. Contusio Duopatch werd dermatologisch getest en kan onopvallend onder de kledij gedragen worden.

Dubbele patch, betere kleefkracht.






Eigenschappen

- Gunstige effecten van warmte: stimuleert bloedcirculatie. Door de warmte verwijderen de bloedvaten, wat de bloedcirculatie verbetert. Hierdoor verhoogt de toevoer van zuurstof en essentiële voedingsstoffen naar de spierweefselcellen.
- Verbetert de eliminatie van secundaire metabolieten: het afvalmateriaal geproduceerd door de celweefsels en spieren wordt makkelijker afgevoerd door een betere doorbloeding.
- Verlicht pijn: warmte vermindert spanning, ontspant en verbetert de beweeglijkheid.

Gebruik

- Reinig en droog de te behandelen huid zorgvuldig.
- Verwijder de beschermfolie voor gebruik.
- Plaats de pleister op de pijnlijke huid.
- Zorg ervoor dat de volledige patch goed op de huid hecht. (Het kan ongeveer 30 minuten duren tot de gewenste temperatuur bereikt wordt.)
- Draag de pleister minstens 8 uur.
- De pleister mag zichzelf niet overlappen (bijvoorbeeld rond de pols).
- Bij menstruatiepijn: plaats de pleister met de kleefzijde op het ondergoed en niet rechtstreeks op de huid.
- Controleer of de pleister perfect blijft kleven.

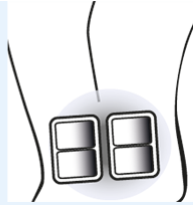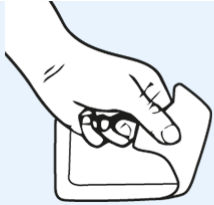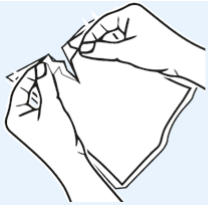

Inhoud

Doos 6 stuks

Bewaring

- 60 maanden na productiedatum
- individueel product: zie verpakking

Bewaren op een droge plaats, in gesloten verpakking, niet in direct zonlicht.

Contusio Duopatch is een medisch hulpmiddel.

Versie: 14/05/2024