



000/0020.081/20

Cutastrip, hechtingsstrips

De Cutastrip is een klevende hechtingsstrip zonder draad.



Eigenschappen


- Afmetingen: 75 x 6 mm.
- Snel en gemakkelijk aan te brengen.
- Houdt de wondranden van een kleine wonde samen.
- Handig meeneemdoosje met 5 pouches.
- 3 hechtingsstrips per pouch.
- Hygiënisch dankzij de individuele verpakking in pouches.
- Hechtingsstrips bevorderen een mooi cosmetisch resultaat.

Toepassingen

- Sluiting van oppervlakkige wonden, zonder insertie-punten.
- Extra ondersteuning in combinatie met draad- of nietjes-hechting.

Gebruik

- Na het reinigen van de huidwond en de huidwondranden, stevig de eerste helft van de strip loodrecht op de huidwondranden aanbrengen.
- Vervolgens de wondranden naar elkaar toe brengen en de tweede helft van de strip aankleven.
- De volgende strips op dezelfde wijze aanbrengen met een tussenruimte van +/- 3 mm.
- Eenmalig gebruik.

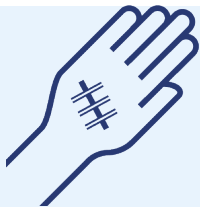

Inhoud

5 x 3 strips

Bewaring

- Vervaldatum: 48 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel, CE approved.

Versie: 14/05/2024