



000/0060.040/20

Coohy, koelend Hydrogelkompres

Coohy is een niet-inklevend, waterrijk Hydrogelverband.



Eigenschappen


- Afmetingen: 6,5 x 5 cm.
- Bevat tot 70% water.
- Koelend effect.
- Niet-inklevend Hydrogelkompres dat overtollig huidvocht licht absorbeert.
- Zorgt voor een vochtige wondomgeving.
- Transparant.
- Pijnloos verwijderbaar.

Toepassingen

- Eenmalig gebruik.
- Ter verzorging van verhitte huid en van weinig vochtige snij- en schaafwonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, open, diepe of geïnfecteerde wonden.

Gebruik

- Verwijder de witte schutbladen en breng de Coohy aan op de wond.
- Laat de transparante folie bovenaan op de Coohy vastgehecht: hierdoor voelt de Coohy niet plakkerig aan.
- Fixeer de Coohy met een pleister of verband.
- Controleer de wond regelmatig en vervang de Coohy indien nodig, uiterlijk na 3 tot 5 dagen.

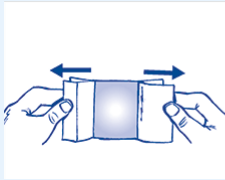

Inhoud

Doos 12 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 18/05/2024