

000/0060.042/20



Coohy Fingertip, koelende Hydrogelpleister voor de vinger

Coohy Fingertip is een niet-inklevende pleister met waterrijk Hydrogelkompres. Het unieke vingerpleister-model creëert een constante koeling all around. Ideaal voor gebruik in de voedingssector door de blauwe kleur en metaaldetecteerbare aluminiumstrip.



Eigenschappen

- Afmetingen: 9.5 x 13.5 cm.
- Blauwe elastische pleister.
- Koelt de verhitte huid, verzacht hierdoor de pijn en neemt overtollig huidvocht op.
- De koeling komt tot stand door:

Ø het temperatuurverschil tussen de gel en de huid. De verhitte huid heeft een temperatuur van +/- 31°C en de kamertemperatuur bedraagt +/- 20°C.

Ø Het water in de gel heeft een verwarmings-capaciteit: er is warmte-energie nodig om de temperatuur te doen stijgen tot de lichaams-temperatuur. Dit proces duurt ongeveer 30 – 45 minuten, met als gevolg dat de gel koud blijft aanvoelen.

Ø Zelfs wanneer de Coohy Fingertip 31°C heeft, kan het water in de gel verdampen. Ook nu is er warmte-energie nodig om te verdampen en deze energie wordt van de huid genomen. Daardoor blijft de Coohy Fingertip koud aanvoelen gedurende enkele uren na het aanbrengen.

- Uniek model van pleister, specifiek ontwikkeld voor de vingers en de vingertoppen.
- Dit pleistermodel garandeert een constante koeling van de volledige vinger: cooling all around.
- Model geregistreerd door MExT.
- Metaaldetecteerbaar.


- Hypoallergeen.
- Pijnloos verwijderbaar.
- Product voor eenmalig gebruik.

Toepassingen

- Ter verzorging van: weinig vochtige schaaf- en snijwonden, eerstegraadsbrandwonden, verhitte, uitgedroogde huid.
- NIET geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- NIET geschikt voor tweedegraads- en derdegraadsbrandwonden.

Gebruik

- Plaats een MExT Vingerling blauw over de pleister om te beschermen tegen vocht en micro-organismen.
- Als het koelend effect verdwenen is, de huid verder behandelen met een verzorgende zalf voor verhitte huid (bv. Flamex) of een nieuwe Coohy Fingertip aanbrengen om de afkoelingsfase te verlengen.

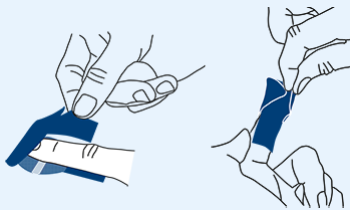

Inhoud

- 6 stuks.

Bewaring

- Koel en droog bewaren op kamertemperatuur.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum :zie individuele verpakking.

Coohy Fingertip is een medisch hulpmiddel.

Versie: 18/05/2024