

000/0140.010/20



Bloodstop, bloedstelpende poederspray met m.doc

Bloodstop zorgt voor het snel en efficiënt stelpen van oppervlakkige bloedingen. Bloodstop bevat het bloedstelpende m.doc™ dat overtollig bloed omzet in een zacht gelkorstje.




Eigenschappen

- Inhoud: 80 ml.
- Spray voor wondverzorging.
- Stopt bloedingen bij kleine snij- en schaafwonden.
- Actief ingrediënt m.doc™ (Microdispersed Oxidised Cellulose).
- Medisch hulpmiddel, niet steriel.

Gebruik

- De spuitbus altijd verticaal houden en goed schudden.
- Verticaal sprayen vanop een afstand van 10-15 cm.
- Overvloedig en rechtstreeks op de wond spuiten.
- Wanneer het bloeden stopt: restpoeder verwijderen en pleister of verband aanbrengen.
- Of overvloedig op het verband of de pleister spuiten.
- Vervolgens pleister of verband op de wond aanbrengen.

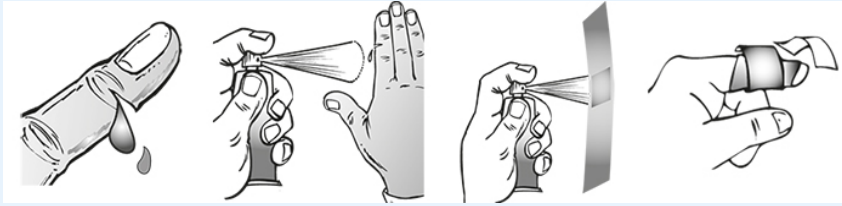

Inhoud

- Spuitbus.

Bewaring

- Op kamertemperatuur en droog bewaren.
- Vervaldatum: 36 maand na productiedatum.

Bloodstop is een medisch hulpmiddel.

Versie: 18/05/2024