

000/0150.020/20



Rescue Mask

De Rescue Mask is ontworpen voor de mond-op-mondbeademing van volwassenen en kinderen (? 40kg) die niet meer ademen.

Eigenschappen

- Gewicht: 40 gr.
- Niet-steriel.
- Luchtventiel werkend in één richting en vervangbaar.
- Met hoofdriem.
- Herbruikbaar.
- Latexvrij.
- Belangrijkste onderdelen: zuurstofmasker, eenrichtingsklep, aansluiting zuurstofdarm, houder.

Gebruik

- Duw het masker met het aanzetstuk naar buiten (fig. 1).
- Ga naast het hoofd van de patiënt zitten, met uw knieën op de grond.
- Maak de luchtwegen vrij en plaats het masker op het gezicht van het slachtoffer: het smalle deel over de neus, het brede deel tussen onderlip en kin (fig. 2).
- Hou een hand op het voorhoofd en druk met wijsvinger en duim het masker vast op het gezicht. Kantel het hoofd voorzichtig naar achter.
- Voer met de andere hand de kinlift uit.
- Leg uw duim op het masker en druk het masker op de kin.
- Bevestig het elastiekje achter het hoofd van het slachtoffer.
- Hierdoor blijft het masker gemakkelijker op zijn plaats zitten.
- Adem diep in, blaas rustig uit in het masker gedurende 1 seconde zoals bij een normale ademhaling en kijk of de borstkas omhoog gaat.
- Als dit zo is, heeft u een effectieve beademing gegeven (fig. 3).
- Haal uw mond van het masker en kijk of de borstkas weer naar beneden gaat (fig. 4).
- Geef op dezelfde manier de tweede beademing.
- De twee beademingen mogen in totaal niet meer dan vijf seconden duren.
- Na de twee beademingen stapt u terug over op 30 borstcompressies.
- Ga door met borstcompressies en beademingen in de verhouding 30:2.
- Onderbreek de reanimatie niet, behalve wanneer het slachtoffer (goed) bij bewustzijn komt: hij beweegt, opent zijn ogen en begint normaal te ademen.

- Als de patiënt braakt, verwijder het masker en maak de luchtwegen van de patiënt vrij.
- Maak het masker schoon, vreemd materiaal wegschrobben.
- Controleer of het masker nog goed werkt door in de klep te blazen.
- Ga verder met de beademing van de patiënt.



Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Bewaar het masker in de houder op een koele, goed verluchte plaats.
- Langdurige en continue blootstelling aan zonlicht kan de houder vervormen en een goede werking van het product in gevaar brengen.
- Het product mag niet blootgesteld worden aan of in contact komen met warmtebronnen van verbrandingsstoffen of brandbare stoffen.
- Was het masker af met warm water en zeep.
- Spoel vervolgens in proper water.
- Laat het masker daarna ongeveer 10 minuten weken in een oplossing van 1:64 natriumhypochlorietwater.
- Spoel het masker vervolgens opnieuw met proper water en laat het drogen.
- De eenrichtingsklep is niet herbruikbaar voor de behandeling van patiënten.

De Rescue Mask is een medisch hulpmiddel.

Versie: 15/05/2024