



000/5160.404/30

Mondmasker FFP2 Mumu - 10st (WIT)

Het FFP2 NR stofmasker beschermt drager én omgeving tegen het inademen van de kleinste in de lucht zwevende deeltjes en druppeltjes.

Eigenschappen

- Wit, 5-lagig stofmasker behorend tot categorie van PBMs
- Adembeschermingsklasse FFP2 NR conform test standaard EN 149:2001+A1:2009
- CE gekeurd onder nummer 2841, merk MUMU
- Comfortabele en mooie afsluiting op het gezicht
- Moduleerbare en geïntegreerde neusclip
- Gevouwen, 2 oorelastieken
- Elk masker is individueel verpakt

Toepassingen

Zie gebruiksaanwijzing op de individuele verpakking.

Product voor eenmalig gebruik.

Gebruik

4 stappen:

1. Was je handen, haal het masker uit de verpakking en controleer het op beschadiging.
2. Breng het masker voor uw gezicht en zorg ervoor dat het uw mond en neus bedekt. Plaats de lussen rond uw oren.
3. Druk de neusclip tegen de neuscontouren, zodat het masker goed aansluit.
4. Test of het masker goed zit. Zorg ervoor dat er geen lekken zijn rond de neus of de rand van het masker om een goede pasvorm te garanderen.

Masker vervangen: aan het einde van elke werkdag (= max. 8 uur) / indien nat of beschadigd



Inhoud

10 stuks/doos

Individuele gesealde verpakking

Bewaring

3 jaar houdbaar na productiedatum indien bewaard bij kamertemperatuur en in gesloten verpakking

Individueel product: zie verpakking

CE 2841-markering volgens (EU) 2016/425 betreffende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), conform norm EN 149:2001+A1:2009

Versie: 14/05/2024