

000/0030.032/12

Snelverband (10cm x 12cm)



Het **steriele** snelverband is een beschermend windsel met een absorberend kompres. Het zorgt voor een efficiënte bescherming en fixatie van verwondingen aan de vinger, de hand, het been of de voet.

Eigenschappen

- Elastische zwachtel.
- Niet-inklevend kompres.
- Groot absorptievermogen.

Gebruik

- Reinig de wond.
- Neem in elke hand een zwachtel.
- Plaats het kompres op de wonde. Wikkel het windsel rond de arm, de hand, het been of de voet.
- Verbind de uiteinden van de windsels met elkaar.
- Om een groter absorptievermogen te bereiken, kan men hydrofiele watten bovenop het kompres leggen.



Bewaring

Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum mits bewaring op kamertemperatuur. Individueel product: zie verpakking.

Het steriele snelverband is een medisch hulpmiddel.

Versie: 18/05/2024