

000/0010.012/20



VFMK Propolis, zelfklevend vingerverband

praktische dispenserbox

VFMK Propolis is een **zelfklevend vingerverband** waarmee kleine alledaagse verwondingen snel en hygiënisch verzorgd kunnen worden.



Eigenschappen

- Zelfklevend, wit verband op rol.
- Kleeft niet aan de huid, wond of het haar.
- Met de hand afscheurbaar.
- Blijft kleven bij gebruik in water.
- Laat de huid ademen.
- Propolis heeft een antibacteriële en ontstekingsremmende werking.
- Bevat latex (kan allergische reacties veroorzaken).


Toepassingen

- Vingerverband.
- Ter verzorging van licht exsudatieve wonden.
- Kan ook als kompres gebruikt worden.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- 10 tot 15 cm verband afscheuren en beschermingspapier verwijderen.
- Op droge en propere huid aanbrengen.

- Verband rond de vingertop wikkelen en goed aandrukken.
- Bij gebruik als kompres: het verband een aantal keren opvouwen, op de wond leggen en fixeren.
- Nat verband vervangen.

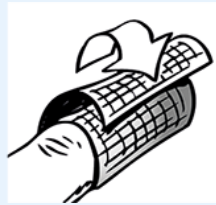

Inhoud

Per 2 rolletjes verpakt in een handig dispenserdoosje.

Bewaring

- VFMK Propolis is per rol afzonderlijk verpakt in folie.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel en CE approved.

Versie: 14/05/2024