



000/0080.020/30

Isothermdeken

De Isothermdeken isoleert slachtoffers in afwachting van verdere hulpverlening. Die isolatie gebeurt zowel tegen de koude als tegen de warmte.

Eigenschappen

- Afmetingen: 1.6 x 2.2 m.
- Altijd meeneembaar dankzij compacte verpakking (10 x 15 cm).

Toepassingen

- De isothermdeken houdt het slachtoffer op temperatuur zodanig dat er geen onderkoeling of verhitting mogelijk is.
- Bescherming tegen regen en vochtigheid.
- Bescherming tegen zon.

Gebruik

- In geval van **onderkoeling**: wikkel het slachtoffer in een isolatiedeken, zodat er slechts een dunne luchtlaag blijft tussen de folie en het slachtoffer. Deze luchtlaag wordt opgewarmd door de lichaamswarmte en fungeert als isolatie tegen de koude omgeving.
- Een isothermdeken kan ook dienen als **zonnescerm** (bijvoorbeeld bij een **zonnslag**). Richt daarbij de goudkleurige kant naar het slachtoffer. Wikkel een slachtoffer van een zonne- of hittedslag in geen geval in een isothermdeken.
- Eenmalig gebruik.

Inhoud

Per stuk

Bewaring

Koel en droog bewaren op kamertemperatuur.

Vervaldatum: 5 jaar na productiedatum.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel en CE approved.

