

000/0010.027/30



## ECV10, elastisch cohesief verband (0,10x4m)

ECV is een ondersteunings- en fixatiewindsel dat voldoet aan vele eisen. Het biedt een grondige fixatie zonder te verschuiven terwijl het de beweging van de patiënt zo min mogelijk belemmert.



### Eigenschappen

- Wit, elastisch verband op rol.
- Kleeft op zichzelf. Kleeft niet aan de huid, kledij of haartjes.
- Sterk elastisch, garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Luchtdoorlatend.
- Kan met de hand afgescheurd worden.

### Toepassingen

- Steunverband voor de vinger, arm, voet etc.
- Afdekken of fixeren van pleister of kompres.
- Eenmalig gebruik.

Dankzij de cohesieve eigenschappen van ECV hoeven de windingen slechts één derde overlappend worden aangelegd. Zo bespaart u materiaal en tijd, dit in tegenstelling tot de klassieke bandages. Het windsel zit plooienvrij en hindert de bewegingen niet.

ECV verzekert een constante en regelbare druk.

## Gebruik

- Elasticiteit met mate gebruiken: een te grote spanning kan de bloedsomloop verstoren.
- Om het windsel correct aan te brengen dient de crêpestructuur altijd zichtbaar te blijven. Doorgaan met verbinden waarbij iedere slag één derde van de vorige slag bedekt.
- De laatste slag mag niet in aanraking komen met de huid, maar moet de vorige slag volledig bedekken.
- Vervang verband, indien nat.



## Inhoud

- 2 x doos à 2 stuks

## Bewaring

- ECV is per rol afzonderlijk verpakt in folie.
- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats tussen 10-25°C, geen direct zonlicht.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

**Versie: 14/05/2024**