

000/0060.043/30



Coohy, koelend Hydrogelkompres

Coohy is een niet-inklevend, waterrijk
Hydrogelkompres met langdurig koelend effect.



Eigenschappen

- Steriel, niet-inklevend Hydrogelkompres. Bevat tot 70% water.
- Hydrogel: vocht wordt afgegeven aan de gede vitaliseerde weefsels van de wond en overtollig wondvocht wordt geabsorbeerd, waardoor een soort 'microklimaat' ontstaat voor wondgenezing: de combinatie Hydrogel, wond-vocht en het gebrek aan zuurstof creëert een vochtige wondomgeving waardoor de huid in de wond sneller wordt geregenereerd. Kan bevorderend zijn bij angiogenese.
- Hydrogel werkt pijnverlichtend en zorgt voor een verzachtend effect (geen korstjes).
- Laat geen resten achter en minimaliseert pijn bij vervanging van het kompres.
- De bovenkant van het kompres is voorzien van een niet verwijderbare film om het verdampingsproces te vertragen.
- Koelend gevoel:
 - door het temperatuurverschil tussen de gel (kamertemp.) en de (verhitte) huid;
 - Het water in de gel heeft een verwarmings-capaciteit, m.a.w. er is warmte-energie nodig om de temperatuur te doen stijgen tot de lichaamstemperatuur;
 - Zelfs wanneer de gel dezelfde temperatuur als de huid heeft overgenomen, kan het

water in de gel verdampen. Ook nu is er warmte-energie nodig om te verdampen en deze energie wordt aan de huid onttrokken, wat terug een koelend effect heeft.

- Semi-transparant: ideaal voor wondinspectie.

Toepassingen

- Ter verzorging van verhitte huid en van droge of weinig vochtige wonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.

Gebruik

AANBRENGEN

- Haal het kompres uit de verpakking.
- Trek de ene helft van het witte schutvel eraf, plaats het kompres op de wond of de huid, strijk het glad en trek de andere helft van het schutvel eraf.
- Gebruik voor grotere wondoppervlakken verschillende kompressen naast elkaar.
- Fixeer met een geschikt verband, zwachtel, tape of drukverband, indien van toepassing.

VERWIJDEREN

- Til één hoek op en verwijder voorzichtig het kompres.
- Indien nodig, kan het kompres eerst worden geweekt met zoutoplossing om het te rehydrateren en vervolgens te verwijderen.

VERVANGEN

- Bij overmatig wondvocht, moet Coohy vervangen worden.
- Bij minder of weinig wondvocht, kan Coohy om de 2-3 dagen worden vervangen totdat de wond geneest.

Inhoud

Doos 12 stuks

Bewaring

- Koel en droog bewaren op kamertemperatuur.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.

Dit product is een medisch hulpmiddel class I steriel, CE0123 gekeurd.

Versie: 02/08/2025